



Mit dem OraLine-Drogentest läßt sich der Mißbrauch von vier Drogen in menschlicher Mundflüssigkeit nachweisen. OraLine ist ein Schnelltest für klinische Laboratorien, Suchthilfeeinrichtungen, Strafvollzugsanstalten, Polizei und Arbeitsmedizin.

Mit OraLine erkennt man einen vor kurzem erfolgten Drogenkonsum und kann diesen in Zusammenhang zur Beeinträchtigung stellen.

Mitgelieferte Testbestandteile

Jede Testpackung enthält:

- 1 Gebrauchsinformation
- 20 Teststäbe zum Nachweis von Cocain, Methamphetaminen, Opiaten und THC, einzeln im versiegelten Folienbeutel verpackt. Die Folienbeutel enthalten zusätzlich ein Trocknungsmittel.
- 20 Sammelbecher für Mundflüssigkeit (alternative Proben-gewinnung)



Weitere Produkte

Visualine® V, X oder Cup VI (Paneltest für Urin)

Anwenderfreundliche Schnelltests für den qualitativen Mehrfachnachweis von Drogen bzw. deren Hauptmetabolite in Urin. Das Visualine® VI Cup Testpanel umfaßt Cannabinoide (THC), Cocain (COC), Opiate (OPI), Benzodiazepine (BZD), Phencyclidin (PCP) und Amphetamine (AMP).



ProbeLine® II, III oder IV (Paneltest für Urin)

Schnelltests für den qualitativen Mehrfachnachweis von 2, 3 oder 4 Drogen auf einem Teststreifen oder einer Testkassette für das Screening von Urinproben.



ProbeLine® DRC (Drug-Residue-Check)

Schnelltest für den Nachweis von festen Ausgangssubstanzen (Opiate/Cocain/Methamphetamine) bei der Untersuchung von Oberflächen verdächtiger Gegenstände auf Drogenspuren.



AlcoStat® (Alkohol-Schnelltest)

Teststreifen für den semiquantitativen Alkoholnachweis mittels Farbskala ab 0,2 Promille (0,02%) in Speichel oder Urin.



OraLine™

Drogen-Schnelltest



Mehrfach-Test für Speichelproben

Mundflüssigkeit bzw. Speichel hat bei der Drogenanalyse gewisse Vorteile gegenüber anderen biologischen Flüssigkeiten wie Urin oder Blut. Speichel ist einfach zugänglich und weniger leicht zu verfälschen als Urin. Mundflüssigkeit ermöglicht die Untersuchung auf vor kurzem erfolgten Drogenmissbrauch, die Drogen werden entdeckt, bevor sie verstoffwechselt im Urin gefunden werden. Die mit OraLine untersuchten Drogen werden bereits in einer geringeren Konzentration als in Urinproben nachgewiesen. Der OraLine-Drogentest erkennt in der Mundflüssigkeit Stammverbindungen und Metabolite der Drogen.



OraLine ist ein immunchromatographischer Schnelltest mit der Genauigkeit eines Immunologischen Testverfahrens ohne erforderliche Laborgeräte. OraLine ermöglicht eine visuelle Auswertung durch Farblinien, die sich abhängig von der Drogen-Konzentration in der Probe bilden oder ausbleiben. Die Nachweisgrenzen der mit OraLine nachweisbaren Drogen oder deren Metabolite sind aus der Tabelle ersichtlich. Mit OraLine erhält man schnell Testergebnisse an Ort und Stelle.

Nachweisbare Drogen

Mit dem OraLine-Speicheltest lassen sich Drogen ab den unten angegebenen Grenzwerten erfassen.

THC – Cannabinoids(delta 9-THC) (11-nor-delta 9-COOH-THC) (Marijuana, Hash, Pot)	4-10 ng/mL 2-10 ng/mL
COC – Kokain Benzoylcegonine (Crack, Coke)	50-60 ng/mL 30-40 ng/mL
MET – Methamphetamine (Speed, Crank, Ecstasy)	40-50 ng/mL
OPI – Opiates (Morphine) (Heroin, Morphine, Codeine)	30-40 ng/mL

Der OraLine-Drogentest


OraLine wurde für die Untersuchung von Mundflüssigkeit entwickelt. Mundflüssigkeit bzw. Speichel wird direkt mit dem OraLine-Test gesammelt. Andere Mittel oder Hilfsstoffe sind für die Probenentnahme nicht erforderlich. Die mit dem löffelähnlichen Ende aufgenommene Speichelmenge ist für den OraLine-Test optimal. Die aus Mundflüssigkeit gewonnenen Proben erfordern keine Vorbehandlung, aber vor der Probengewinnung ist Trinken und Essen zu vermeiden, damit die Proben nicht beeinträchtigt werden.

Griffiges aus Kunststoff gegossenes Testgehäuse


Im gut einzusehenden Fenster haben Sie einen uneingeschränkten Blick auf den patentierten farbcodierten Testbereich.

Ein einzigartiges Verfahren befördert den Speichel direkt zum Teststreifen.


Die besondere, einzigartige Gestaltung des Löffels erlaubt ein sauberes, sicheres und einfaches Sammeln von Speichelproben ohne spezielle Übung oder Ausrüstung.

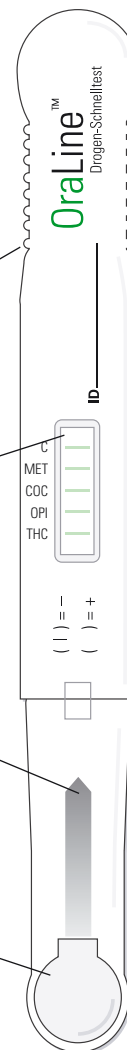


Beispiele möglicher Testergebnisse

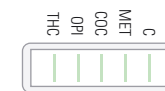


Vor der Testdurchführung markieren grüne Linien die Position der Testlinien für Methamphetamine (MET), Cocain (COC), Opiate (OPI) und Cannabinoide (THC) und der Kontroll-Linie (C).

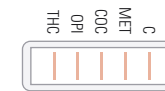


Rote Linien an allen vier Drogenpositionen bedeuten ein *negatives* Ergebnis für THC, OPI, COC und MET.

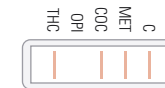

Opiate (OPI) *positiv*, THC, COC und MET *negativ*.

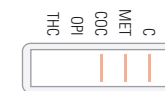

THC und OPI *positiv*, COC und MET *negativ*.

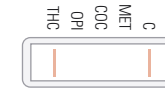

OPI, COC und MET *positiv*, THC *negativ*.

Erst wenn die Kontroll-Linie bei C deutlich ausgebildet ist, sollten die Testergebnisse ausgewertet werden.

Wenn die Kontroll-Linie fehlt, sind die Ergebnisse nicht zuverlässig. Mit einem neuen OraLine-Speicheltest dann die Untersuchung wiederholen.

OraLineTM
Drogen-Schnelltest